

MANUAL DE MONTAGEM FACE SHIELDS

Bem vindo!

Estamos muito felizes de ter você conosco, contribuindo de perto e com muita mão na massa em prol dessa causa tão nobre, junto aos profissionais de saúde no combate ao covid-19. Com seu apoio e da sua família, conseguiremos alcançar mais gente em menos tempo. Você agora também é parte do "efeito rede" da nossa REDE PROTEÇÃO SOLIDÁRIA. Chega mais e vamos montar esses escudos de proteção! JUNTOS PODEMOS MAIS !!!

NOSSO PROJETO

- Face shield desenvolvido e aprovado por especialistas da área da saúde
- Produto testado e homologado por intensivistas de área de "covidário" em hospitais
- Material feito em polipropileno natural e PET cristal
- Fabricado com uso de cortadora a laser
- Produzido nos laboratórios maker de escolas e instituições parceiras da Rede
- Fornecemos consultoria pro-bono para replicar o modelo por empresas e em outros segmentos
- Projeto 100% pensado para ser compartilhado, bem de encontro ao espírito maker
- Projeto permite livre distribuição e alteração, desde que citada a fonte original

CARACTERÍSTICAS

- De fácil higienização, basta usar água e sabão neutro
- Suporte anatômico de apoio na testa do usuário
- Maior facilidade na respiração em relação as máscaras comuns
- Moderna, feita com material resistente, confortável, leve e reutilizável
- Transparente, permitindo uma comunicação clara
- Produto 100% sustentado por trabalho de voluntários e doações
- Produto não vendido, somente doado


DICAS

- Separe todas as peças antes de iniciar a montagem
- Assista rapidamente os vídeos com os 5 passos da montagem
- Siga o passo-a-passo na ordem recomendada
- Sugerimos que faça todas as peças numa única leva por etapa
- Ligue um som de sua preferência e divirta-se!
- "Voilà!"... Face shields prontos!!!




Tudo o conteúdo apresentado nesse documento, incluindo o projeto do face shield está sob uma licença aberta Creative Commons
CC-BY-SA @ 2020 Rede Proteção Solidária
Livre distribuição e alteração, desde que citada a fonte original

NOSSO PROJETO

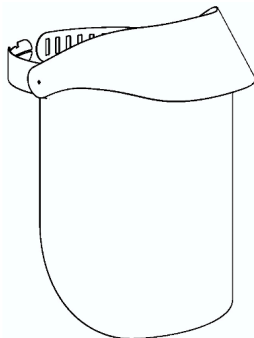


FACE SHIELD FABRICADO COM CORTE A LASER	
FACE SHIELD	
REPERIÇÃO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA AVANÇADA DE KIT FACTORYSHOP	
TIPO DE OPERAÇÃO: CORTADO	USO: ÚNICO
PROJETO DE CORTE E MONTAGEM DE MONTAGEM	01 04
ESQUEMA DE MONTAGEM	
ESQUEMA DE MONTAGEM	

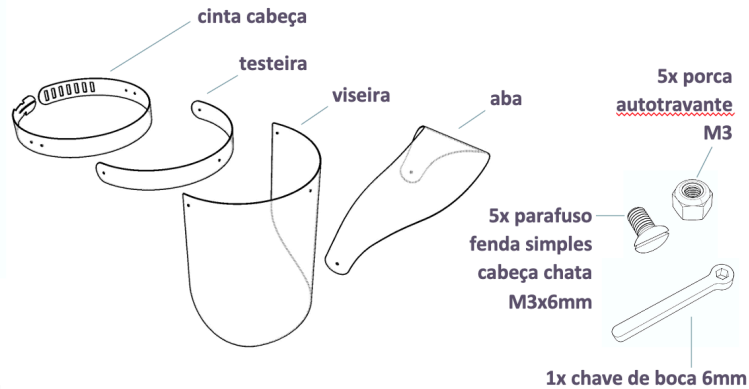

3 PASSOS DA MONTAGEM




- 1** Posicionar a **viseira** frontal sobre a testeira alinhando a sua furação;
B) Iniciar a fixação da viseira sobre a testeira com o parafuso e porca no furo central. A porca fica sempre voltada para o lado de fora da máscara

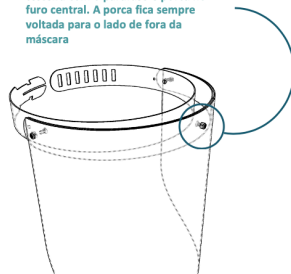


ASSISTA A UM VÍDEO COM O PASSO-A-PASSO DA MONTAGEM CLICANDO AQUI.

- 2** Fixar o conjunto da viseira/testeira na cinto da cabeça em ambos os lados, utilizando as porcas e parafusos nos furos mais próximos da parte da frente da máscara.

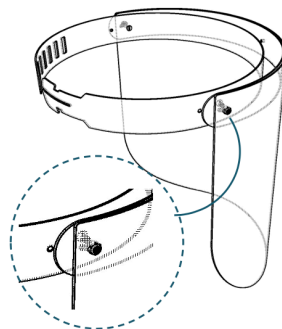

- 3** Fixe a aba de proteção na cinto da cabeça em ambos os lados, nos furos que sobram.

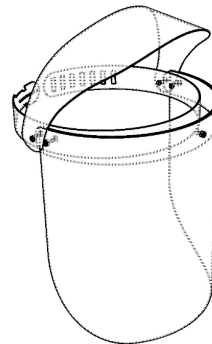

MANUTENÇÃO & HIGIENIZAÇÃO

- Esse face shield foi pensado e construído com carinho para NÃO ser descartável
- A recomendação é que o face shield seja de uso INDIVIDUAL e intransferível
- O maior segredo está no CUIDADO!
- Lavar apenas com ÁGUA e SABÃO neutro
- Pode utilizar álcool 70 para higienizar
- A frequência de HIGIENIZAÇÃO deve ser DIÁRIA
- Não passar produtos químicos ou buchas abrasivas

VOCÊ SABIA?

- Proteção total da face do usuário (rosto, nariz, boca e olhos)
- Previne contágio contra vírus, bactérias e outras contaminações
- Ajuda a não propagar o contágio de doenças transmissíveis pela saliva e fluidos nasais
- Permite conversar de forma clara, sem causar ruídos no som da voz
- Constrói uma barreira física impedindo saliva arremessada ao falar, tossir ou espirrar
- Indicada para profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, dentistas e outros
- Pode ser usada também por pessoas comuns, que buscam total proteção do rosto